

Istruzioni

| | Display | Azione | Stato |
|---|---------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | | Premi il bottone | Stand by |
| 2 | | Premi il bottone | Attivo |
| 3 | | Inserisci la cannucchia e attendi | Preparazione |
| 4 | | Soffia fino al termine del countdown | Acquisizione dati |
| 5 | | Attendi | Elaborazione dati e calcolo |
| 6 | | Leggi il risultato | Risultato |

Messaggi di Errore



Il dispositivo non ha ricevuto sufficienti dati: il soffio era troppo breve o troppo debole.




Il calcolo non è attendibile: hai soffiato subito dopo aver bevuto o ci sono troppi gas presenti nell'alito.

Precauzioni d'uso

1 Non utilizzare la stessa cannucchia per più di 5/6 volte, poiché la condensa che si forma all'interno della stessa potrebbe venire a contatto con il sensore e comprometterne il funzionamento.

2 Alcuni gas alterano i risultati. Per questo motivo, i fumatori dovranno attendere almeno 5 minuti dall'ultima sigaretta prima di effettuare il test.

3 Poiché il tasso dell'alcol nel sangue muta nel tempo, è utile sapere che raggiunge il suo picco solo dopo varie decine di minuti dall'assunzione. Per questo motivo, è consigliabile ripetere il test, in modo da individuare il momento in cui il tasso alcolemico comincia a scendere.

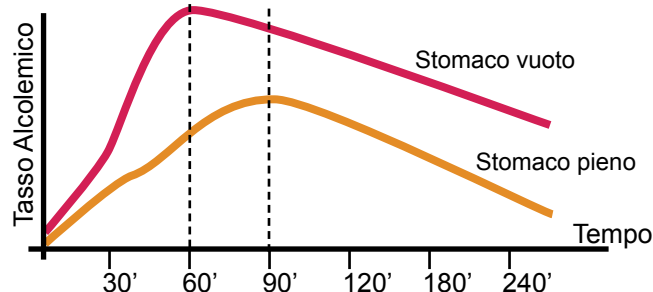

4 Il risultato del test potrebbe restituire valori diversi da zero anche a persone che non hanno assunto bevande alcoliche. Questo perché alcuni gas contenuti nell'alito possono stimolare il sensore.